




Antes de usar o Sistema de Microfone Remoto (SMR): *Avaliação é essencial*

Para quem?

Crianças usuárias de AASI
(Aparelho de Amplificação Sonora
Individual) ou IC (Implante Coclear)

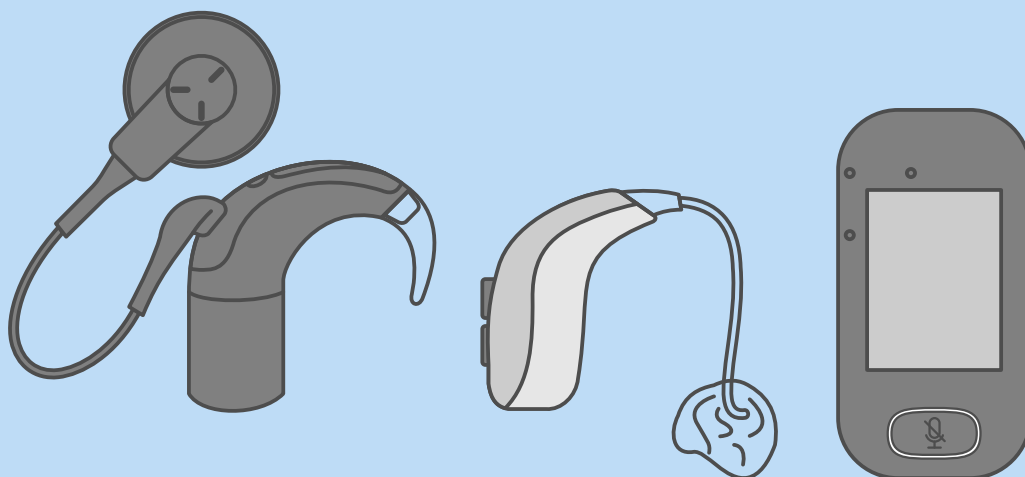

Passo 1: Avaliar habilidades

Audição



Linguagem



Atenção!

Se essas habilidades não estiverem desenvolvidas ou em desenvolvimento, O SMR pode não trazer os benefícios esperados.



Recomenda-se:

Avaliação clínica
individualizada

Acompanhamento
com fonoaudiólogo
especializado

Planejamento do uso
do SMR conforme o
perfil da criança

Avaliar as características técnicas dos dispositivos, que devem conter:

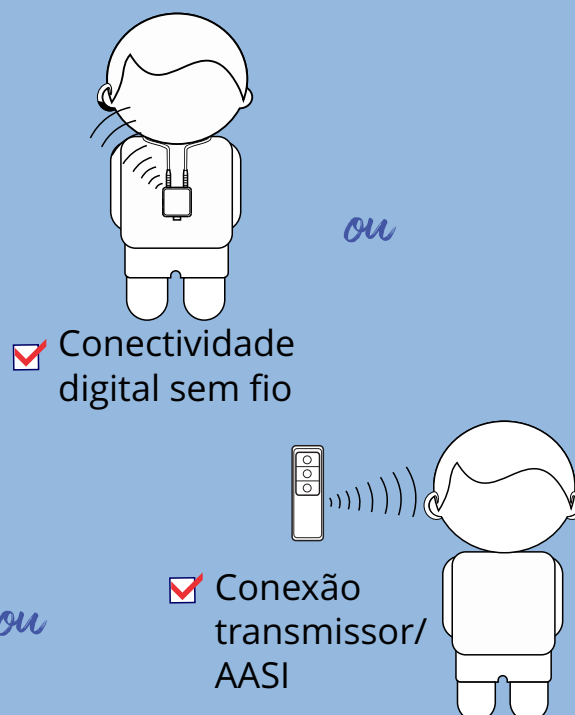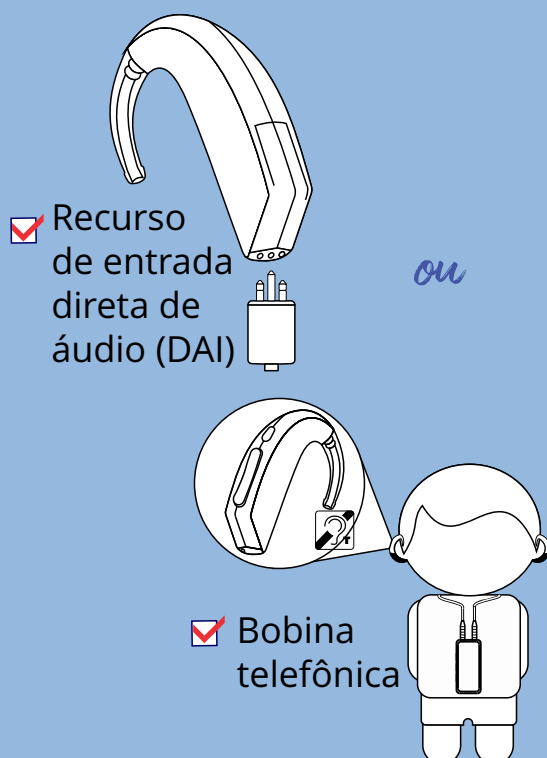

ROGER - Conectividade sem fio da Phonak

A Phonak oferece dois modos de conexão entre microfones Roger e aparelhos auditivos, atendendo às diferentes tecnologias e contextos de uso:

1 Roger Direct



- Conexão direta entre o transmissor Roger e o aparelho auditivo
- **Sem necessidade de receptores físicos externos**



Requer o uso do Roger Installer: para ativar a funcionalidade Roger no aparelho auditivo

Compatível com os aparelhos auditivos Phonak:

Marvel

Paradise

Lumity

Infinio



Veja como
parear (como
conectar
via Roger
Installer)



Veja como
parear (como
conectar
Roger On iN
via Roger
Direct)



2 Roger Unlimited



- Nova geração de microfones com **receptores ilimitados integrados**
- **Dispensa instalação** — basta ligar o microfone e usar
- Ideal para **ambientes com múltiplos usuários**, como escolas e reuniões

Transmissores Roger compatíveis com Roger Unlimited:



**Roger
On**



**Roger
Select**



**Roger
Table Mic**



**Roger
Touchscreen**

Ligou = Conectou

Compartilhamento facilitado entre usuários

Novos recursos inteligentes e app otimizado



**Veja como
parear (como
conectar Roger
via Roger
Unlimited)**



Diferença principal:

Roger Direct		Roger Unlimited	
Receptor embutido no AASI ou no processador do IC		Capacidade do microfone de transmitir para vários receptores	
Relacionado ao AASI ou ao processador do IC		Relacionado ao microfone transmissor	

ROGER CONFIGURATOR

Descubra aqui se
o seu AASI/IC é
compatível com a
tecnologia Roger.



EduMic – Conectividade sem fio com aparelhos auditivos Oticon

O EduMic é um sistema de microfone remoto projetado para transmitir a voz do interlocutor diretamente para os aparelhos auditivos da Oticon via **tecnologia sem fio de 2,4 GHz, sem necessidade de receptores adicionais.**

Ficha de dados
técnicos EduMic



Vídeos
sobre
EduMic





Modelos compatíveis com EduMic

Infantil (Play)		Opn Play, Xceed Play
Adulto		Opn S, Opn, Engage, More, Xceed, Siya
Oticon Medical		Ponto 4, Ponto 5 Mini


Como usar
o EduMic?



Guia de
compatibilidade
EduMic



Perguntas
frequentes
(FAQ - EduMic)

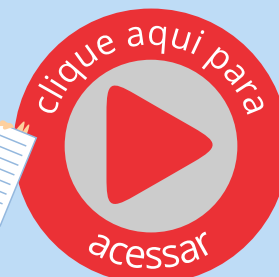

COCHLEAR

Cochlear®

Categoria	Informação
Processadores	Nucleus 8*  Kanso 2 
Conectividade	Auracast* Nucleus Smart App    ☒ Não compatível com Roger Direct ☒ Compatível com Roger Unlimited  
Microfones Compatíveis	Mini Mic 2+  Roger Touch-screen  Roger Select  Roger On 
Receptores Compatíveis	Roger 20*  Roger X (via Mini Mic 2+) 
Bobina Telefônica	☒ Compatível com Roger NeckLoop (ativar T-Coil/ Bobina telefônica) 

Verifique aqui as possibilidades de conectividade dos IC da Cochlear

<https://www.cochlear.com/global/pt-br/compatibility>

ADVANCED BIONICS (AB)



Categoria	Informação
Processadores	Naída CI Marvel  Sky CI Marvel 
Conectividade	AB Remote App  Download on the App Store GET IT ON Google Play ☒ Compatível com Roger Direct  ☒ Compatível com Roger Unlimited 
Microfones Compatíveis	Roger Touch-screen  Roger Select  Roger On 
Receptores Compatíveis	Roger Direct 
Bobina Telefônica	☒ Compatível com Roger NeckLoop (ativar T-Coil/ Bobina telefônica) 

Verifique aqui as possibilidades de conectividade dos IC da AB

<https://www.advancedbionics.com/br/pt/home/explore/legacy-ci-product-support-and-resources/legacy-cochlear-implant-accessories>

MED-EL**MED^oEL**

Categoria	Informação
Processadores	Sonnet 2 e 3  Rondo 2 e 3 
Conectividade	AudioKey3 App    Audio2Ear App     ☒ Não compatível com Roger Direct ☒ Compatível com Roger Unlimited  
Microfones Compatíveis	Audio Link  Audio Link XT  Roger Touch-screen  Roger Select  Roger On 
Receptores Compatíveis	Roger 21 (Sonnet)  Roger X 
Bobina Telefônica	☒ Compatível com Roger NeckLoop (ativar T-Coil/ Bobina telefônica) 

Verifique aqui as possibilidades de conectividade dos IC da Medel

<https://www.medel.com/pt-br/hearing-solutions/cochlear-implants/audio-processor-comparison>